

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}

Verpleegdeken 40051^{TS}

Het verpleegdeken is een vriendelijke vorm van fixeren voor onrustige bewoners. Het is ideaal voor zowel gebruiker als verpleger/verzorger. Het geeft de gebruiker voldoende bewegingsvrijheid en vervangt onprettige fixatiemiddelen. Het voorkomt bovendien blootliggen en werkt preventief in hygiëne. De bewoners kunnen d.m.v. de rits makkelijk verschoond worden terwijl ze in het deken zitten. Het materiaal is zeer sterk, heeft een hoge scheurweerstand en is brandvertragend. Het verpleegdeken kan beschouwd worden als een laken, dat overgaat in een jasje. Het wordt gesloten door een stevige rits die sluit naar het voeteinde toe.

Kwaliteit 1010: Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.

Het is VERPLICHT om het verpleegdeken steeds samen te gebruiken met een bedhek.



Md 40051^{TS}

Matrasomvattend verpleegdeken, zonder mouwen, (maat S/M, **L/XL**, XXL), hals met afscherming van de rits, 2 zijdelingse openingen met rits, rits vooraan.

Optie: *40051 B: rits op de schouders
*40082: 10 cm extra hoogte

	S/M	L/XL	XXL
Borstomtrek	<85	85-125	>125

Wasvoorschrift van kwaliteit 1010:

1. *Wassen* Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. *Spoelen* GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen* Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...)


Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}



1. Plaats de onderste laag onder de matras en bevestig het bovendee aan de onderste laag met de donker grijze ritsen.



2. Open de licht grijze rits vooraan en laat de patiënt op de matras zitten. Steek beide armen door de armgaten in het jasje en sluit de rits.

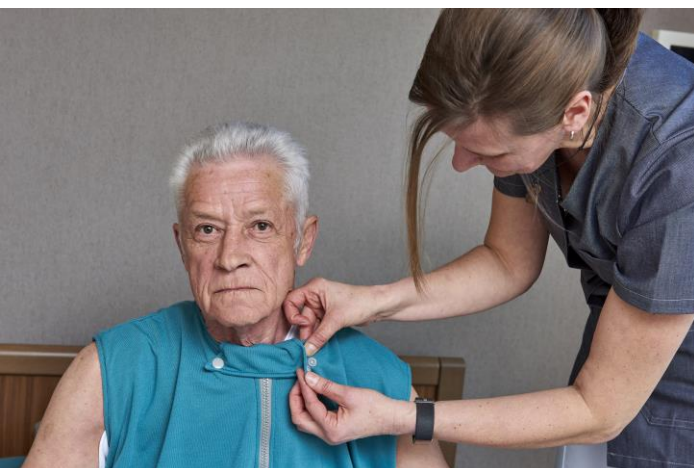

3. Sluit het afschermstrookje met de kunststof drukknopen en breng de bedhekken in hoge positie.

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}

Deze opties zijn toepasbaar op al onze matrasomvattende verpleegdeken.



40082: een muurtje van 10 cm dat d.m.v. ritsen tussen de onderlaag en het bovenste deel van het verpleegdeken wordt aangebracht. Hierdoor krijgt de patiënt in het verpleegdeken 10 cm extra hoogte.



40083: een muurtje van 10 cm dat in de onderste helft van de matras oploopt tot 20 cm. Dit muurtje wordt d.m.v. ritsen tussen de onderlaag en het bovenste deel van het verpleegdeken aangebracht. Hierdoor krijgt de patiënt in het verpleegdeken 10 cm extra hoogte en aan de voeten 20 cm, zodat men hier in het verpleegdeken ook kussen kan aanbrengen voor zwevende hielen.

